


ニュー楽シャン&楽ラク訪問チェア君組立・解体-収納補足説明フォト入り

①

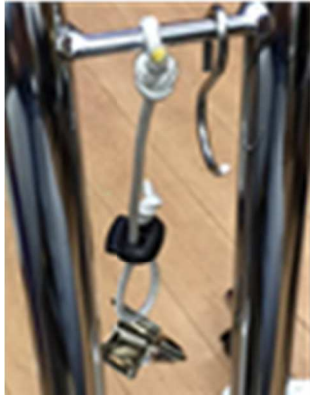

②



③



④




① は組立終了正面

②クリップと S 字フック

③ビニール袋の片方を掛ける

④ポンプを引っ掛ける

⑤

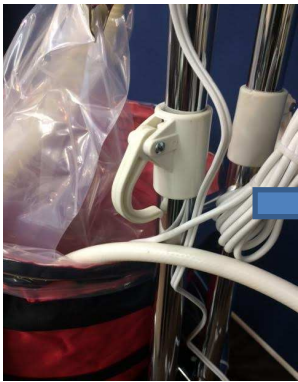

⑥



⑦



⑧



⑤のフォト中央のレバーに

⑥のようにホースを挟む

排水用ポリビニールの上部を合わせ⑦の様に留める

⑧解体するとコンパクトになります ⑩は組み立て後の横から見たフォト

⑨




⑩



⑨持ち運びに便利なバックを準備 横向きに入れること


横 70 ㌢ 縦 50 ㌢ 幅 20 ㌢位のバッグがベスト

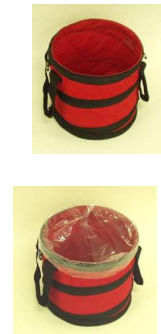

⑪



バケットに専用ポリビニールを装着してください

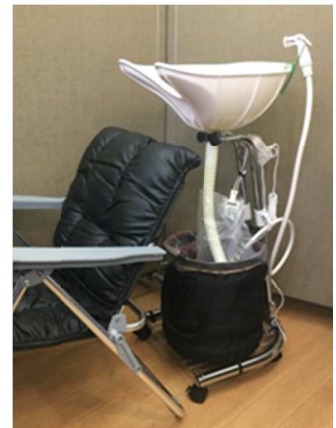

専用チェアは 3,4Kg 器具一式 7.3Kg

専用バッグに入れた状態

組立使用直前